


# KROG

Mit uns  
wird's leichter.

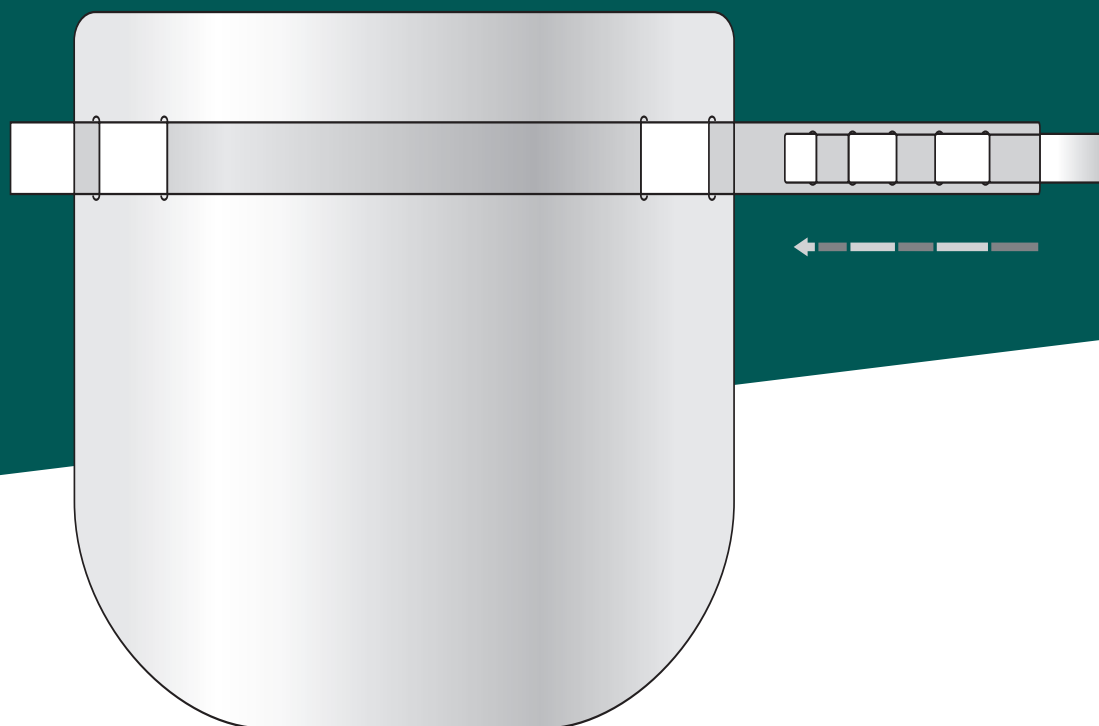

## SCHUTZVISIER

ARTIKELNUMMER: 5908000

1. Schieben Sie das Stirnband durch die Öffnungen des Visiers, so dass der Hauptteil des Stirnbandes sich auf der Innenseite des Visiers (zur Stirn hin) befindet.
2. Befestigen Sie die Enden des Stirnbandes entsprechend der Abbildung und legen Sie es um Ihren Kopf, um Ihre Kopfgröße zu messen. Stellen Sie die Größe so ein, dass das Stirnband eine bequeme Passform hat.
3. Um den Abstand zwischen dem Visier und dem Gesicht einzustellen, drücken Sie auf das Visier am Stirnband und schieben Sie es nach hinten oder vorne.

### BESTELLUNGEN & ANFRAGEN

VALDEMAR KROG GMBH T + 49 (0) 40 - 8000 775-0 F + 49 (0) 40 - 8000 775-69  
INFO@KROG.DE WWW.KROG.DE